



WIEDERVERWENDBARE GESICHTSMASKEN: GEBRAUCHSANLEITUNG

1

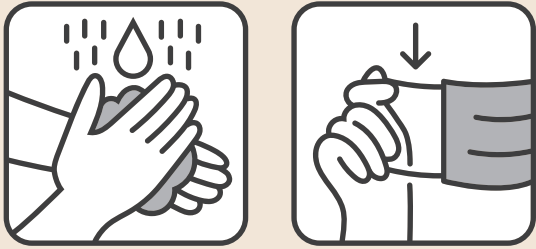


Waschen Sie Ihre Hände gründlich mit Wasser und Seife, bevor Sie die Stoffmaske berühren.
Greifen Sie zum An- und Ablegen nur die Bänder, um eine Kontamination zu vermeiden.

2

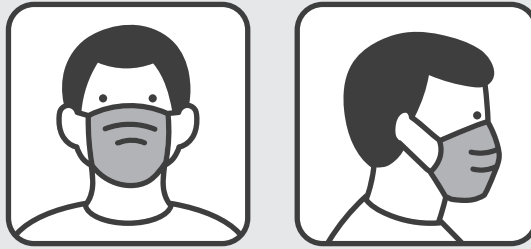


Stellen Sie sicher, dass die Maske eng und lückenlos an Nase, Mund und Kinn anliegt.

3

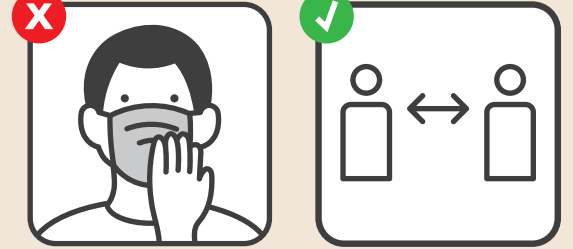


Halten Sie sich weiterhin an die Hygieneregeln:
Fassen Sie sich nicht ins Gesicht und wahren Sie mind. 1,5 Meter Abstand.

4

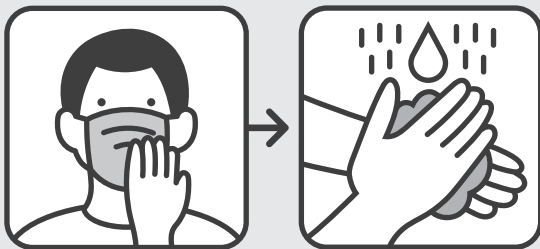


Falls Sie die Maske berühren sollten, waschen Sie sich sofort die Hände.

5

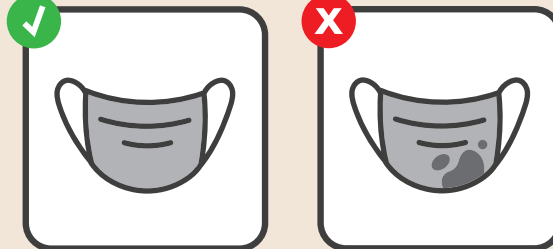


Wechseln Sie die Maske gegen eine neue, sobald sie feucht oder schmutzig ist.

6

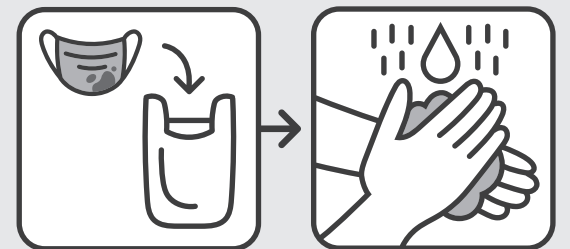

Verstauen Sie die Maske nach Gebrauch sofort in einer Plastiktüte, bis Sie sie waschen können. Dann sollten Sie sich die Hände waschen.

7

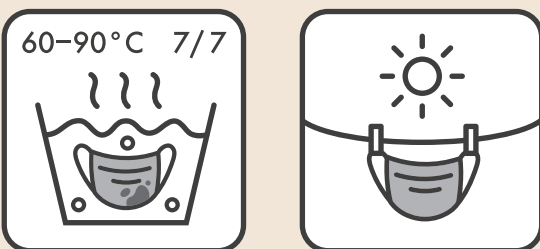

Reinigen Sie Ihre Maske mindestens einmal täglich bei 60-90°C, oder mit Wasser und Seife. **Lassen Sie sie vor dem nächsten Gebrauch komplett trocknen.**

8



Die Tüte, in der Sie eine getragene Maske verstaut haben, entsorgen Sie so, dass niemand sie anfassen kann. Alternativ waschen und trocknen Sie die Tüte. Reinigen Sie sich danach die Hände.

i



DIE WIEDERVERWENDBARE GESICHTSMASKE EIGNET SICH NICHT FÜR MEDIZINISCHES PERSONAL AM ARBEITSPLATZ.